

Vinkkejä Attends-tuotteiden valintaan ja käyttöön

Kullekin käyttäjäasiakkaalle pyritään löytämään hänelle parhaiten soveltuvat tuotteet [Attendsin laajasta tuotevalikoimasta](#). Vuorokaudessa tarvittavien vaippatuotteiden määrä vaihtelee yleensä yhdestä viiteen (1-5) tuotteeseen riippuen inkontinenssin asteesta ja käyttäjän mahdollisista muista erityistarpeista. [Kokonaistaloudellisin](#) ratkaisu antaa käyttäjälleen riittävän suojan ja varmuuden tunteen ilman, että tuotteista on valittu käyttäjän tarpeeseen nähden turhan imukykyisiä tuotteita, joiden imukykykapasiteetti jää osittain käyttämättä.

Vaippojen kosteusindikaattori kertoo vaipanvaihtotarpeesta ja toisaalta selkeänä pysynyt [kosteusindikaattori](#) kertoo, että vaipassa on vielä imukykyä käyttämättä.

Attends-vaippatuotteet ovat teknologialtaan pitkälle kehittyneitä ja [selkeä numeromerkintä 0-10](#) kertoo inkontinenssituotteiden imukyvyn jokaisessa tuotesarjassa (Soft-tippasuojat, Slip-teippivaipat, Contours-muotovaipat jne.). Vaippatuotteet toimivat parhaiten yksittäin käytettynä, vaikka joskus lisävaipan käyttö voi olla perusteltua.

Kaikki [Attends-vaippatuotteet](#) pakataan tuotantolinjoilla tiiviisti ja puristus säilyy napakoissa tuote-pakkauksissa. Käyttöön otettaessa vaippatuotteet tuleekin avata hyvin ja vaippoihin tehdään ”kouru” ennen paikoilleen asettamista (kts. esim. Attends Contours).

Käyttäjäasiakkaan yökäyttöön riittämättömäksi jääneet vaippatuotteet voi hyvin hyödyntää päiväkäytössä ja yöksi tilata astetta imukykyisempiä vaippoja.

Soft-tuotesarja

Soft- tuotesarja on suunnattu aktiivisille, omatoimisille, lievistä ja keskivaikeasta virtsankarkailusta kärsiville. Anatomisen muotoilunsa vuoksi ne ovat huomaamattomat käyttää ja leveä teippiraita takaa tuotteen paikallaan pysyvyyden. Tuotteiden pehmoresorit estävät ohivuodot, vaikka tuotesarja ei varsinaisia vuotosuojia sisälläkään. Soft-tuotesarjassa on imukyvyt 0-7 ja se soveltuu sekä miehille että naisille. Miehille löytyy myös oma [Attends for Men](#) -tuotesarja, jossa on imukyvyt 1-4.

Attends Contours -muotovaipat

Muotovaipoissa ei ole tarra- tai teippikiinnitystä, hyvä paikallaan pysyminen edellyttää verkkohousujen tai napakoiden alushousujen käyttöä. Ennen paikalleen asettamista muotoile vaippa kouruksi, jolloin suoja asettuu paremmin haaroihin ja vuotosuojat nousevat estämään reunavuodot. Miehille tuotetta voi käyttää asettamalla vaipan takaosan eteen (vrt. Attends Slip). Attends Contours Regular -muotovaipoissa on perinteinen muovitausta ja erityisen ihoystävällisissä Attends Contours Air Comfort -tuotteissa on kuitukangastausta.

Attends Slip -teippivaipat

Huomioikaa, että miehet tarvitsevat imukykyä erityisesti edessä, jolloin teippivaippaa voi vaihtoehtoisesti käyttää niin, että vaipan takaosa puetaankin eteen ja kiinnitys tulee taakse. Attends Slip Active -sarjassa on tarrat helpottamassa vaipan asettelua ennen kiinnitystä kummallakin sivulla olevalla leveällä teippikiinnityksellä. Teippi on uudelleen avattavissa/kiinnitettävissä valkoisesta teipistä, kiinnitysalustana oleva sinisen teippi jää tuotteeseen. Active-vaipan voi poistaa repäisemällä sivuilta kuitukankaan. Attends Slip Regular -sarjassa on kaksi kiinnitysteippiä kummallakin sivulla varmistamassa napakan kiinnitykset.

Attends Flex -vyövaipat

Tuotteet sopivat runsaasti kasteleville WC:ssä autettuna käyville henkilöille. Silloin vyökiinnitystä voi erityisesti hyödyntää kiinnittämällä tarrat selkäpuolelle. Vyö tulee kohdistaa lantion päälle. Vaippaa vedetään napakasti ylöspäin ennen kiinnitystä vyöhön.

Puuttuva Flex XL -koko voidaan korvata [Slip Regular Plus 10 XL -teippivaipalla](#), joka sopii vatsakkaalle paremmin, saadaan 4 kiinnityspistettä. Flexin helppoa kiinnitystä ei päästä muutenkaan isolla potilaalla hyödyntämään potilaan hankalan liikuteltavuuden vuoksi.

Attends Pull-Ons -inkohousut

Inkohousut tukevat omatoimista WC:ssä käyntiä, sillä housut on asiakkaan helppo pukea ja riisua ne itse. Niiden kanssa ei tule käyttää muita vaippatuotteita. Inkohousut on tarvittaessa helppo avata sivusaumasta repäisemällä.

Attends Cover-Dry -vuoteensuojat

Vuoteensuojissa on imukykyä parantavaa imurouhetta ja reunoissa kosteussulut. Sarjassa on viisi (5) eri kokovaihtoehtoa. 80x170 cm koossa on erityiset petaussiivekkeet, jotka pitävät vuoteensuojan erityisen hyvin paikoillaan. [Kokonaistaloudellisuutta ja käyttö mukavuutta](#) ajatellen useampi pieni tuote kannattaa vaihtaa yhteen isompaan tuotteeseen.

Deoplus -lisävaippa

Lisävaipan käyttö ei ole suositeltavaa. Vaippatuotteiden teknologiset ominaisuudet toimivat parhaiten, jos vaipan sisälle ei aseteta "päällekkäisiä" tuotteita. Joskus kuitenkin tarvitaan lisäapua virtsasuihkun suuntaamiseen erityisesti miehillä tai jatkuvaan ulostetuhrintaan. Deoplus- lisävaipassa ei ole muovitaustaa, jolloin kastuessaan se päästää kosteutta myös varsinaiseen vaippaan. Huomioitavaa on, että Deoplus ei ole pintakuiva ja tuote tulisikin poistaa aina sen kastuttua.

